

Mentenanța autoclavului

Element de întreținere	Frecvență	Instrucțiuni de operare	Riscuri ce pot rezulta din neefectuarea întreținerii conform reglementărilor
Cameră de sterilizare	La fiecare ciclu de sterilizare	La sfârșitul fiecărui ciclu de sterilizare, scoateți mai întâi tava pentru instrumente și suportul, apoi ștergeți cu un prosop umed petele și murdăria de pe pereții interiori ai camerei de sterilizare. Notă: Scoateți filtrul de scurgere de jos pentru curățare. Înainte de a scoate filtrul de scurgere, ștergeți murdăria din jur pentru a preveni căderea impurităților în conducta de abur și înfundarea supapei solenoid.	Pachete ude, defecțiuni la supapa de siguranță a presiunii, etc.
Suprafața aparatului	1 dată/zi	Ștergeți cu un prosop umed praful și abțibildurile de pe suprafața aparatului, în special capacul superior, unde se acumulează ușor praf.	Îmbătrânire și îngălbenire
Garnitura ușii	1 dată/săptămână	Scoateți garnitura ușii și clătiți-o la chiuvetă pentru a vă asigura că nu rămân particule sau alte impurități pe suprafață; în același timp, folosiți un bețișor de curățare sau tampoane de vată pentru a șterge canelura de etanșare a capacului ușii, apoi reinstalați garnitura.	Poate apărea ușor scurgere de aer, ceea ce duce la oprirea funcționării echipamentului.
Rezervor apă curată	1 dată/săptămână	Goliți rezervorul de apă curată, folosiți o cârpă sau o periuță mică pentru a îndepărta murdăria din interior, clătiți cu apă, goliți rezervorul și apoi umpleți-l din nou cu apă distilată curată.	Impuritățile pot bloca supapa solenoid, pompa de apă și alte componente, împiedicând funcționarea normală.
Filtrul rezervorului de apă	1 dată/săptămână	Deschideți capacul rezervorului de apă, scoateți filtrul alb de la baza rezervorului, demontați și clătiți filtrul pentru a asigura o filtrare corespunzătoare a apei.	Alimentare insuficientă cu apă → apare alarma și ciclul de sterilizare nu poate fi finalizat.
Țeava generatorului de abur	1 dată/lună	Rulați funcția de curățare automată, apăsați pe pictograma „Set up” și introduceți parola 223456. Notă: Înainte de rulare, scoateți toate obiectele din cameră, umpleți rezervorul cu apă distilată și conectați scurgerea de apă reziduală.	Țeava se blochează și ciclul de sterilizare nu poate fi finalizat.
Întreținere profesională	1 dată/an	Vă rugăm să apelați periodic la ingineri profesioniști pentru a efectua întreținere completă, inclusiv inspecția conductelor, calibrarea parametrilor de temperatură și presiune și testarea performanței.	Îmbătrânirea componentelor → sterilizarea nu poate fi finalizată.

Memento de utilizare:

- ✓ Nu introduceți în autoclav sau în pungile de sterilizare instrumente murdare. Curățați-le prin introducerea în baia cu ultrasunete.
- ✓ La finalul ciclului de sterilizare, fiți atenți când deschideți ușa: așteptați semnalul sonor ce indică finalizarea ciclului de sterilizare, asigurați-vă ca presiunea este la nivel zero și stați la distanță de fanta ușii pentru a evita arsurile provocate de abur.