

Estetică obținută ușor: Gradia Direct de la GC.

Compozit restaurativ fotopolimerizabil
pentru restaurări "invizibile"

GC GRADIA DIRECT este un compozit cu o structură a particulelor unică și un sistem de culori simplu dar în același timp deștept. Disponibil în versiunile Anterior și Posterior, GC GRADIA DIRECT stabilește un nou standard pentru 'invizibilitatea' estetică și ușurința în folosire, realizând o restaurare superbă, naturală doar cu o culoare, iar dacă mai este necesară îmbunătățire estetică există posibilitatea adăugării simple de noi nuanțe.



GRADIA DIRECT A FOST
COTATĂ CU "EXCELENT"
CU 5 PUNCTE DIN 5 DE
CĂTRE THE DENTAL
ADVISOR (VOL. 21 - 2004)

Un sistem de nuanțe unic chiar pentru mai multă simplitate

Restaurările invizibile necesită selectarea corectă a unei nuanțe sau a mai multor nuanțe de GC GRADIA DIRECT. Pentru a ajuta la alegerea culorii, cromaticii, intensității și transluenței corecte există un sistem de culori cu ghid de culori deștept și remarcabil de simplu proiectat atât pentru tehnica unei singure nuanțe cât și pentru tehnica cu mai multe nuanțe.



Culorile Standard

Pentru tehnica unei singure culori, folosirea doar uneia din culorile standard dă un rezultat excelent. Disponibil atât în versiunea Anterior cât și în cea Posterior, fiecare reprezintă un echilibru delicat între culoare, cromatică, intensitate și transluență. Versiunea Anterior are grupul de culori A, B și C bazat pe Ghidul de culori VITAPAN Classical®, cât și CV (Cervical), XBW (Alb foarte deschis) și BW (Alb Deschis). Versiunea Posterior are doar culorile A.



Exemplu de restaurare anterioară



Exemplu de restaurare posterioară

Culori Speciale

Deși GC GRADIA DIRECT asigură o estetică excelentă pentru 95% din procedurile care folosesc doar o singură culoare, sunt desigur și cazuri când este preferată tehnica mai multor nuanțe cum sunt cazurile în care sunt necesare restaurări extensive. Există două tipuri de nuanțe adiționale din care se alege, numite culori speciale care sunt plasate sub sau peste o culoare standard.

Culori Speciale Interioare

Acestea sunt culorile opace care sunt plasate sub o culoare standard pentru a da căldură culorii finale și pentru a bloca 'stălucirea întunecată' din cavitatea bucală. Există patru nuanțe Special Interioare: AO2, AO3, AO4 și X-AO2.



Exemplu de restaurare anterioară



GC GRADIA DIRECT are o structură diversă multifacțată similară celei DINTELUI NATURAL. Reflexia și proprietățile optice sunt prin urmare foarte similare, făcând restaurarea 'invizibilă' estetic - invizi-fx.

Culori Speciale Exterioare

Aplicate deasupra unei Culori Standard, aceste nuanțe iau în considerare schimbările legate de vârstă în smalță care afectează transluența și intensitatea. Aceasta dă un aspect mai real.


Cum grosimea smalțului evoluează de la gros la subțire cu vârsta, intensitatea sa se reduce. Pentru un copil culoarea WT (Alb

Transluent) dă albul cel mai intens și nuanța DT (Închis Transluent) este pentru dinții de la adulți mai închiși. Pentru persoanele mai în vârstă este culoarea GT (Gri Transluent) care dă negrul cel mai intens și culoarea CVT (Cervical Transluent) care este pentru zona cervicală.

Când smalțul devine mai subțire, transluența dintelui crește.

Aceasta este remarcată în special la marginile incizale. Pentru a potrivi mai bine transluența actuală poate fi folosită culoarea CT (Clar Transluent) și/sau culoarea NT (Natural Transluent).

Toate Culorile Speciale Exterioare sunt disponibile în versiunea Anterior și Posterior și sunt culori WT și NT.

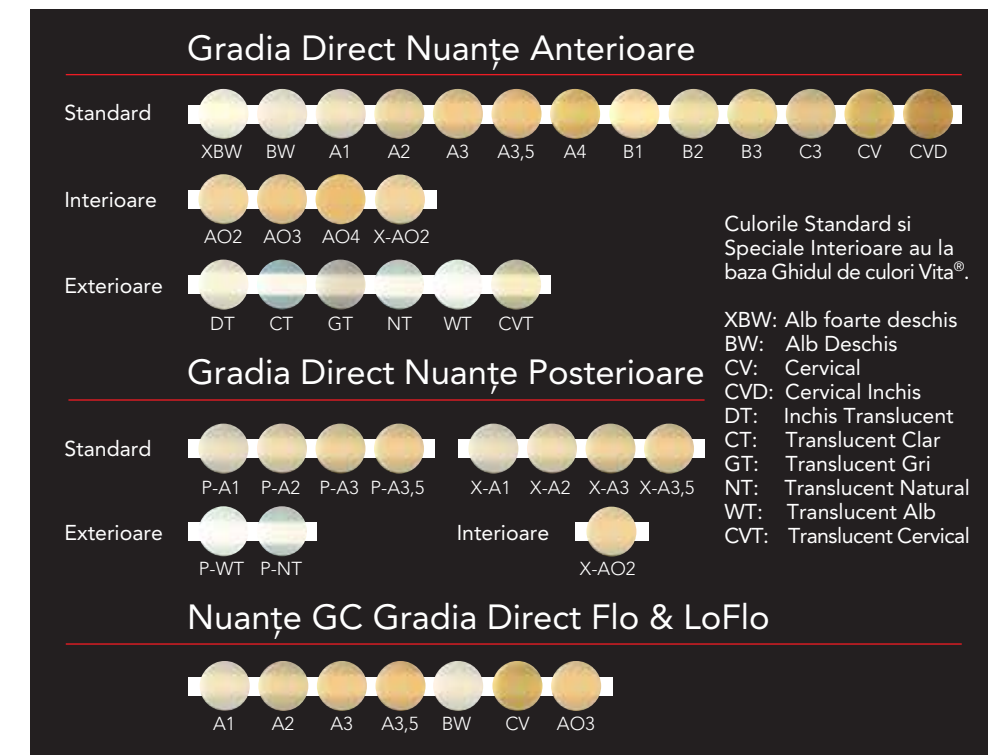


Ghid de culori

Cele mai multe culori sunt legate de Ghidul de culori VITAPAN Classical®, dar unele sunt unice, astfel că pentru a ajuta la alegerea lor există un ghid de culori simplu de utilizat. Acesta are 'degete' cu structură de pană, conturate de grosime crescătoare pentru a ajuta doctorii stomatologi să aprecieze influența grosimii materialului la o anumită nuanță.



GRAFIC DE STRATIFICARE A CULORILOR

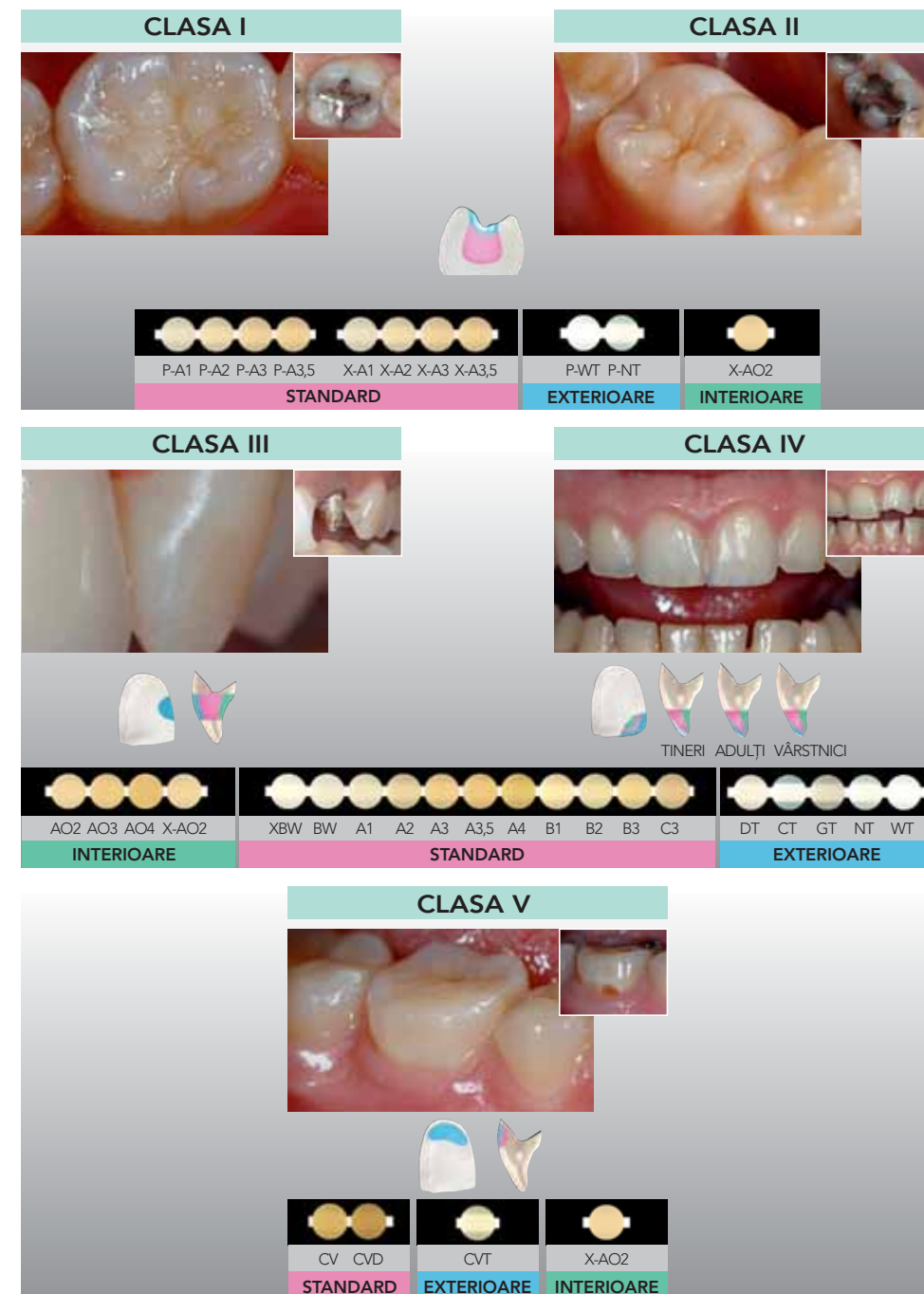

GRADIA DIRECT



Conținut pe seringi: 2.7 ml (4 g) pentru anterior, 2.7 ml (4.7 g) pentru posterior și 2.7 ml (5 g) pentru X
 Conținut pe compulă: 0.16 ml (0.24 g) pentru anterior, 0.16 ml (0.28 g) pentru posterior și 0.16 ml (0.30 g) pentru X

AMBALARE SERINGI

Set Introductiv: (7 seringi), 6 nuanțe de Anterior (A2, A3, A3.5, AO3, CV, CT), 1 nuanță de Posterior (P-A2) & 1 cheie de culori

Set Complet: (26 seringi), incluzând toate nuanțele Standard disponibile (exceptând B1 și XBW), nuanțele Speciale Interioare și Speciale Exterioare & 1 cheie de culori

Rezerve: 1 seringă
COMPULE

Set Introductiv: (35 compule), 6 nuanțe de Anterior (A2, A3, A3.5, AO3, CV, CT), 1 nuanță de Posterior (P-A2) & 1 cheie de culori

Set Complet: (106 compule), incluzând toate nuanțele Standard disponibile (exceptând B1 și XBW), nuanțele Speciale Interioare și Speciale Exterioare & 1 cheie de culori

Rezerve: Cutie de 20 compule de: A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV, DT, NT, P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-WT, P-NT, X-A1, X-A2, X-A3, X-A3.5

Rezerve: Cutie de 10 compule de: A4, B1, B2, B3, C3, AO2, AO4, CVD, BW, XBW, CT, WT, GT, CVT, X-AO2

Accesorii:

1 cheie de culori
 1 Aplicator Compulă



GRADIA DIRECT Flo GRADIA DIRECT LoFlo

AMBALARE

2 x 1.5/1.3 g (0.8 ml) seringi
 4 Compule aplicatoare, tip metalic
 2 light protective caps

Nuanțe: A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV, BW

Accesorii: Compule aplicatoare de plastic si tip metalic, 20 buc



G-Bond

AMBALARE

Set Introductiv:

Sticlă de 5 ml, 50 aplicatoare micro-tip, 1 vârf de aplicare
 Set Starter, Doze 50 x 0.1 ml doze, 50 aplicatoare



G-Light

AMBALARE

Tip EU, incl. accesorii (ghid foto, baterie, încărcător pentru baterie, cordon de alimentare, conuri fotoprotectoare, suport & apărătoare fotoprotectoare)

GC EUROPE N.V.
 Head Office
 Interleuvenlaan 13
 B - 3001 Leuven
 Tel. +32.16.39.80.50
 Fax. +32.16.40.02.14
 info@gceurope.com
 www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
 GC EEO - Romania
 BD. N. Balcescu no.33B
 Ap. 52, floor V, sect.1
 RO - Bucuresti
 Tel. +40.21.31.44.339
 Fax. +40.21.31.44.339
 romania@eoo.gceurope.com
 www.eeo.gceurope.com

GC

z O LF RO 8 60 07/07

Estetică
 obținută ușor:

Gradia Direct de la GC

Compozit restaurativ fotopolimerizabil
 pentru restaurări "invizibile"

...acum cu noile nuanțe X...

GC