

SYSTEM

zetaplus



A MATTER OF TRUST

Clinical

C-Silicone Impression Material

Zhermack[®]

CLINICAL



zetaplus system

Soluții pentru orice situație clinică.

ZHERMACK confirmă succesul produsului **ZETAPLUS SYSTEM**.

ZETAPLUS SYSTEM, apreciat în toată lumea de peste 25 de ani, a menținut în timp performanțe clinice ridicate și fiabilitate constantă pentru a atinge cel mai bun rezultat protetic.





REDUCEREA RISCULUI EROARE

› **Contrast cromatic evident** pentru a diminua **riscului de eroare** cu o economisire ulterioară de timp și de material.

REACTIVITATE ECHILIBRATA

- › **Raport ideal** între timpul de lucru și timpul de priza (efectul **snap-set**).
- › **Dozarea optimă** a catalizatorului care mărește timpul util de lucru și reduce contractia amprente.

EFFECTUL "FLOW CONDITIONING"

- › Fluiditate crescută, stabilitate dimensională extremă, datorate tehnologiei încărcăturilor sferoidale de înaltă activitate SAS (Synthetic Amorphous Silicas).

zetaplus system

Efectul "flow conditioning" pentru o a

ZETAPLUS CU ORANWASH L ȘI THIXOFLEX M

ZETAPLUS, initial fluid si la final rigid

Efectul "flow conditioning" ajuta curgerea materialului și reduce comprimarea mucoasei.

ZETAPLUS este un material putty care datorita rigiditatii sale finale, este recomandat in tehnica dublei amprente.

ORANWASH L, hidrofilie și fluiditate

Acest silicon hidrofil, extreme de fluid, este adecvat pentru tehnica dublei amprentări.

THIXOFLEX M, tixotrop, fluid și hidrofil

Acest silicon, tixotrop și deosebit de fluid garantează o **evidențiere precisă a detaliilor** în mediu umed, datorită hidrofiliei sale accentuate. Recomandat pentru tehnica de amprentare într-un singur timp.



Fluiditate datorită efectului "flow conditioning"



Fluiditate în santul gingival.

amprentă de înaltă acuratete.

ZETAPLUS SOFT CU ORANWASH VL

ZETAPLUS SOFT, fluiditate și elasticitate


Siliconul *putty, fluid și elastic*, potrivit pentru orice situație clinică, este recomandat în mod particular pentru tehnica într-un singur timp.



Rigiditate optimă

ORANWASH VL, hidrofilic și foarte fluid

Acest silicon hidrofilic, extrem de fluid este adecvat pentru toate tehnicile de amprentare.

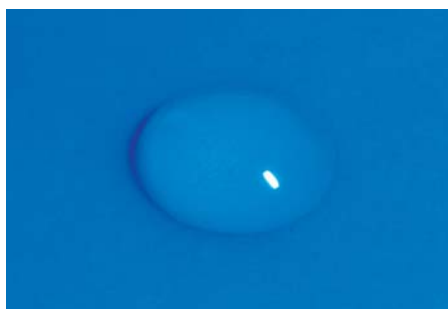

Hidrofilic după 1 minut




Fluiditate timpul lucrului

Indurent Gel și Zetaplus system

Contrastul cromatic ideal.

Catalizatorul **INDURENT GEL** garantează o amestecare omogenă atât în cazul utilizării cu **putty**, cât și în cazul utilizării împreună cu fluidele **ZETAPLUS SYSTEM**.

Raport ideal între timpul de lucru și timpul de priza

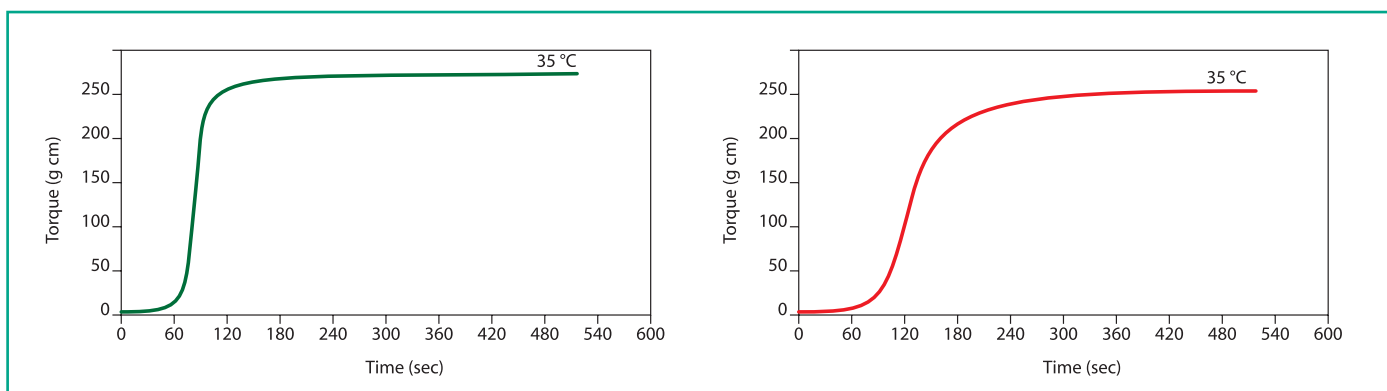

Efect SNAP-SET (zetaplus - zetaplus soft)

Efect SNAP-SET (oranwash VL – oranwash L)

DATE TEHNICE	ZETAPLUS	ZETAPLUS SOFT	ORANWASH VL	ORANWASH L	THIXOFLEX M
Timp de amestecare	30 sec.	30 sec.	30 sec.	30 sec.	30 sec.
Timp total de lucru	1 min. 15 sec.	1 min. 15 sec.	1 min. 30 sec.	1 min. 30 sec.	2 min.
Timp in gura	3 min. 15 sec.	3 min. 15 sec.	3 min. 30 sec.	3 min. 30 sec.	3 min. 30 sec.
Timp de priza	4 min. 30 sec.	4 min. 30 sec.	5 min.	5 min.	5 min. 30 sec.
Deformarea la presiune (min/max)	2% - 5%	2% - 5%	2% - 8%	2% - 8%	2% - 8%
Deformare elastica	> 98%	> 98%	> 99%	> 99%	> 99%
Stabilitate dimensionala	< -0,2%	< -0,2%	< -0,7%	< -0,7%	< -0,7%

Performanțe ZETAPLUS SYSTEM

Clinical

C-Silicone Impression Material



zetaplus system
De încredere în orice situație.

SYSTEM**zetaplus****Ambalaje**

C100600 ZETAPLUS	1 cutie de 900 ml/1.53 Kg + o măsurătoare
C100312 ZETAPLUS	1 cutie de 1800 ml/3 Kg + o măsurătoare
C100468 ZETAPLUS	1 cutie de 10 Kg + o măsurătoare
C100469 ZETAPLUS	1 cutie de 25 Kg
C100730 ZETAPLUS INTRO KIT L	1 cutie Zetaplus, 900 ml/1.53 Kg + o măsurătoare + 1 tub Oranwash L, 140 ml + 1 tub Indurent gel, 60 ml + bloc de amestecare
C100720 ZETAPLUS TRIAL KIT L	1 cutie Zetaplus, 200 ml + o măsurătoare + 1 tub Oranwash L, 40 ml + 1 tub Indurent gel, 60 ml + bloc de amestecare
C100610 ZETAPLUS SOFT	1 cutie de 900 ml/1.53 Kg + o măsurătoare
C100612 ZETAPLUS SOFT	1 cutie de 1800 ml/3 Kg + o măsurătoare
C100613 ZETAPLUS SOFT	1 cutie de 10 Kg + o măsurătoare
C100614 ZETAPLUS SOFT	1 cutie de 25 Kg
C100740 ZETAPLUS SOFT INTRO KIT VL	1 cutie Zetaplus Soft, 900 ml/1.53 Kg + o măsurătoare + 1 tub Oranwash VL, 140 ml + 1 tub Indurent gel, 60 ml + bloc de amestecare
C100710 ZETAPLUS SOFT TRIAL KIT VL	1 cutie Zetaplus Soft, 200 ml + o măsurătoare + 1 tub Oranwash VL, 40 ml + 1 tub Indurent gel, 60 ml + bloc de amestecare
C100650 ORANWASH VL	1 tub de 140 ml
C100660 ORANWASH L	1 tub de 140 ml
C100670 THIXOFLEX M	1 tub de 140 ml

Catalizatori

C100700 INDURENT GEL	1 tub de 60 ml în gel
C100390 INDURENT LIQUID	1 flacon de 30 ml de lichid

Aparat

C303000 ALGHAMIX	Mixer mecanic pentru alginat și siliconi (230 V)*
C303040 ALGHAMIX	Mixer mecanic pentru alginat și siliconi (115 V) *

Accesorii

U113250	Spatulă pentru siliconi din oțel-inox, laminată, sterilizabilă. Ambalajul conține 1 spatulă
D510010	Putty cut
U112270	Bloc de amestecare, 20 de foi
C303020	Disc de amestec pentru siliconi cu 3 paduri de amestec pentru Alghamix
C303030	Bloc de amestecare pentru Alghamix, 20 de foi

*Disc pentru siliconi disponibil ca accesoriu

Branch
Zhermack GmbH Deutschland
 Öhlmühle 10 - D-49448 Marl
 Tel. +49 - 0 54 43 / 20 33 - 0
 Fax +49 - 0 54 43 / 20 33 - 11
 info@zhermack.de
 www.zhermack.com

Branch
Zhermapol Sp. z o.o.
 ul. Augustówka 14
 02 - 981 Warszawa - Polska
 Tel. +48 - 22 858 82 72 - 858 73 41
 Fax +48 - 22 642 07 14
 zhermapol@zhermapol.pl
 www.zhermack.com

Branch
Zhermack Inc.
 151 Industrial Way East Bldg B
 Eatontown, NJ 07724
 Phone +1 - 732 389 8540
 Fax +1 - 732 389 8543
 info.usa@zhermack.com
 www.zhermack.com

Representative Office
Zhermack UK and Ireland
 21 Balmoral Road
 Melton Mowbray - Leics.
 LE13 1JN
 Tel. +44 - (0)7870 690811
 uk@zhermack.com
 www.zhermack.com

Representative Office
Zhermack Russia
 5/2 Marshala Vasilevskogo St.
 123098 Moscow - Russia
 Tel. +7 916 9301191
 info.russia@zhermack.com
 www.zhermack.com

Zhermack SpA
 Via Bovazecchino, 100 - 45021 Badia Polesine (RO) ITALY
 Tel. +39 - 0425 597611 Fax +39 - 0425 53596 info@zhermack.com www.zhermack.com

Zhermack®
 BEYOND INNOVATION