


# G-BOND™ TECHNIQUE GUIDE



Prior to use, carefully read the instructions for use. / Vor der Benutzung Anleitung sorgfältig lesen. / Avant toute utilisation, lire attentivement la notice.

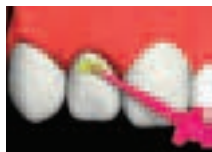

**1 APPLICATION**  
Apply G-BOND™ to entire dried cavity.


**AUFTRAGEN**  
G-BOND™ auf die gesamte, trockene Oberfläche der Kavität geben.

**APPLICATION**  
Appliquer G-BOND™ dans la cavité séchée.



**NOTE:**  
1) Shake the bottle.  
2) Dispense and use immediately.  
**ANMERKUNG:**  
1) Vor Gebrauch die Flasche schütteln.  
2) Nach dem Ausbringen sofort verwenden.

**NOTE:**  
1) Secouer le flacon.  
2) Prélever et appliquer immédiatement.

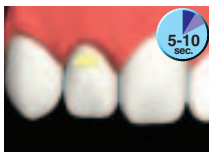

**2 WAITING**  
Leave undisturbed for 5-10 seconds.

**WARTEZEIT**  
5-10 Sek. lang ruhen lassen.

**TEMPS D'ATTENTE**  
Attendre 5-10 secondes.



**3 DRYING**  
Dry thoroughly under MAXIMUM air pressure for 5 sec. in the presence of vacuum suction.

**TROCKNEN**  
Mit MAXIMALEM Druck komplett 5 Sekunden lang bei Absaugereinsatz trocknen.

**SECHAGE**  
Sécher la surface pendant 5 secondes à l'aide d'une seringue à air sous pression MAXIMALE et en présence de l'aspiration.



**4 LIGHT CURING**  
Light cure with a visible light curing unit.

**LICHTHÄRTEN**  
Lichthärtung mit sichtbarem Licht.

**PHOTOPOLYMERISATION**  
Photopolymériser avec une unité lumineuse.


## G-BOND™ Irradiation Time / Belichtungszeit / Temps d'irradiation

| Light curing unit                      | Halogen / LED | G-Light | Plasma arc |
|----------------------------------------|---------------|---------|------------|
| Distance from light guide tip (< 10mm) | 10 sec.       | 5 sec.  | 3 sec.     |
| Distance from light guide tip (> 10mm) | 20 sec.       | 10 sec. | 6 sec.     |

# G-BOND™ TECHNIQUE GUIDE



Prima dell'utilizzo leggere attentamente le istruzioni. / Antes de usar, leer cuidadosamente las instrucciones de uso. / Lees voor gebruik zorgvuldig de gebruiksaanwijzing.

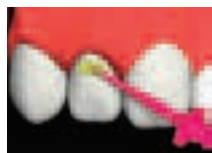

**1 APPLICAZIONE**  
Applicare G-BOND™ sull'intera cavità asciugata.


**APLICACIÓN**  
Aplicar G-BOND™ en toda la cavidad seca.

**AANBRENGEN**  
Breng G-BOND™ aan op de droge caviteit.



**NOTE:**  
1) Agitare la bottiglia.  
2) Erogare e utilizzare immediatamente.

**NOTA:**  
1) Agitar la botella.  
2) Sacar y usar inmediatamente.  
**OPMERKING:**  
1) Schud het flesje.  
2) Verdeel en verwerk onmiddellijk.

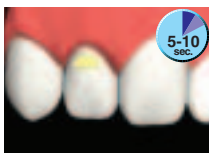

**2 ATTENDERE**  
Non toccare per 5-10 secondi.

**ESPERAR**  
Dejarlo sin tocar durante 5-10 segundos.

**INWERKTJID**  
Gedurende 5-10 seconden ongestoord laten inwerken.



**3 ASCIUGARE**  
Asciugare accuratamente per 5 secondi con la siringa dell'aria alla pressione MASSIMA e sotto aspirazione.

**SECAR**  
Secar minuciosamente bajo MAXIMA presión de aire durante 5 segundos, al mismo tiempo succionar al vacío.

**DROGEN**  
Grondig drogen met MAXIMALE druk gedurende 5 seconden en tegelijkertijd afzuigen.



**4 FOTOPOLIMERIZZARE**  
Fotopolimerizzare con una lampada a luce visibile.

**POLIMERIZACIÓN**  
Polimerizar con una unidad visible de fotocuración.

**LICHTUITHARDING**  
Belicht met een composietlamp.

## G-BOND™ Tempi di irraggiamento / Tiempo de irradiación / Belichtingstijd

| Light curing unit                      | Halogen / LED | G-Light | Plasma arc |
|----------------------------------------|---------------|---------|------------|
| Distance from light guide tip (< 10mm) | 10 sec.       | 5 sec.  | 3 sec.     |
| Distance from light guide tip (> 10mm) | 20 sec.       | 10 sec. | 6 sec.     |