



Dezinfectarea rapidă, cu conținut de alcool, a dispozitivelor medicale neinvazive și a suprafețelor.

mikrozid® AF wipes

Avantajele noastre

- un spectru larg de eficacitate în timp foarte scurt
- fără reziduuri
- gata de utilizare

Domeniile de utilizare

Produsul este adecvat pentru dezinfectarea dispozitivelor medicale și a altor suprafețe. Produsul nostru clasic între dezinfectanții rapizi este adecvat pentru dezinfectarea suprafețelor din apropierea pacientului, cu un risc crescut de infecție și care necesită timpi reduși de expunere.

Eficiență microbiologică

Eficacitate	Concentrație	Timp de contact
bacterică EN13727, EN16615 - condiții de murdărie	Gata de utilizare	1 min.
tuberculică EN14348 - condiții de murdărie	Gata de utilizare	1 min.
levurică EN13624, EN16615 - condiții de murdărie	Gata de utilizare	1 min.
virucidă împotriva virusurilor capsulate EN14476 - condiții de murdărie	Gata de utilizare	30 sec.
activitate virucidă cu spectru limitat EN14476 - condiții de murdărie	Gata de utilizare	30 sec.
Polyoma SV40 în conformitate cu DVV (Asociația germană pentru combaterea bolilor virale)//Ghidul RKI	Gata de utilizare	5 min.

Certificări:

- Certificare VAH
- Certificare ÖGHMP
- Listat de OMS



mikrozid® AF wipes

Date despre produs

Compoziție

100 g de soluție conține următoarele ingrediente active: 25 g etanol (94 %), 35 g propan-1-ol

Date fizico-chimice

Culoare	incolor
Densitate	cca 0,89 g/cm ³ / 20 °C / soluție activă
Punct de aprindere	27 °C / Metodă: DIN 51755 Partea 1 / soluție activă
Formă	Soluție apoasă cu conținut de alcool impregnată în material nețesut
pH	nu este aplicabil
Vâscozitate, dinamică	nu sunt disponibile informații

Recomandări specifice

Utilizați dezinfectantele în condiții de siguranță. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.

Produsul are o bună compatibilitate cu metalele și materialele plastice (cu excepția sticlei acrilice și a vopselelor sensibile la alcool). Nu tratați suprafețe sensibile la alcool în mod specific, precum sticla acrilică. Atunci când utilizați dezinfectanți pe bază de alcool, vă rugăm să respectați normele de protecție împotriva incendiilor și exploziilor în conformitate cu regulamentul asociației comerciale „Dezinfecția în domeniul sănătății”.

A se feri de căldură și de surse de aprindere. Se recomandă purtarea mănușilor de protecție.

Mai multe informații sunt disponibile la cerere. Dacă se manipulează corect, schülke garantează o perioadă de valabilitate la raft de 3 luni de la deschiderea pachetului. Destinat exclusiv utilizării profesionale. Orice incidente grave legate de produs trebuie raportate producătorului și autorității competente.

Nu este destinat dezinfectării finale a dispozitivelor medicale semicritice și critice!

Instrucțiuni de utilizare

Ștergeți bine suprafața cu șervețelul și așteptați până când își face efectul soluția cu ingredient activ. Asigurați umectarea completă și păstrați suprafața umedă pe tot parcursul utilizării. Asigurați-vă că toate urmele vizibile de murdărie au fost îndepărtate înainte de dezinfectare. Tratați numai suprafețe mici. Suprafața de ștergere depinde de temperatura camerei și de structura suprafeței care urmează să fie dezinfectată. Acordați atenție aspectelor de igienă atunci când deschideți pachetul și scoateți primul șervețel. Asigurați-vă că ați închis capacul după utilizare.

Reumplerea cutiei

Întâi dezinfectați-vă mâinile și, apoi, folosiți o pereche de mănuși de protecție noi și un halat. În timpul procesului de umplere, asigurați-vă că mănușile nu sunt contaminate de

alte activități. Transferați autocolantul cu data expirării în cutia dozatoare. Deșurubați capacul, introduceți complet punga cu rezervele în cutia dozatoare (dacă este necesar, modelați-o în prealabil pentru a se potrivi) și tăiați marginea pungii. Trageți primul șervețel de pe rolă, introduceți-l în fanta de ghidare din partea inferioară a capacului și treceți-l prin aceasta.

Dezinfectați capacul și înșurubați-l. Pentru zonele cu risc ridicat, schülke nu recomandă utilizarea pungilor de reumplere.

Informații pentru comandă

Articol	Forma de livrare	Nr. articol
Rezervă mikrozid® AF wipes (150)	20/cutie	la cerere
mikrozid® AF wipes premium softpack (50)	12/cutie	la cerere
Rezervă mikrozid® AF wipes Jumbo (220)	12/cutie	la cerere
Tub mikrozid® AF wipes (150)	10/cutie	la cerere
Tub mikrozid® AF wipes Jumbo (220)	10/cutie	la cerere

Aceste produse nu sunt disponibile în toate țările. Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați sucursala sau distribuitorul nostru local.

Accesorii pentru utilizare

Accesorii pentru utiliza	Cod articol
Suport de perete Jumbo tub	134421
Consolă de montare pe perete pentru dozator (mic)	134417

Produse asemănătoare

- mikrozid® PAA wipes
- mikrozid® sensitive wipes
- mikrozid® universal premium wipes

Informații legate de mediu

schülke fabrică produse economice și cu procese de producție avansate, sigure și cu considerație pentru mediu, în același timp menținând standarde înalte de calitate.

Expertiză și informații

Vă rugăm să vizitați pagina noastră de Internet pentru o trecere în revistă a întregii literaturi/a rapoartelor disponibile pentru produs: www.schuelke.com.

Pentru întrebări individuale:

Telefonul Departamentului aplicații:

+49 40 52100-666

E-Mail: info@schuelke.com



Schülke & Mayr GmbH deține o autorizare a producătorului, conform secț. 13 alin 1 din Legea germană pentru medicamente și certificate GMP (bune practici ale producătorului) de conformitate pentru produsele medicamentoase.

Sediul schülke

Schülke & Mayr GmbH
Str. Robert Koch nr. 2
22851 Norderstedt, Germania
Telefon +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com



Distribuitor autorizat:

S.C. INTERCOOP S.R.L.
547215 Ernei Nr. 376
Jud. Mureș, România
Tel/Fax: 0265-267.708
E-mail: office@intercoop.ro
www.intercoop.ro