



Decalcifierea aparatului de curățat cu abur sub presiune 1+2

Atenție!



- ✓ Utilizați numai soluția de decalcifiere Renfert „Renfert POWER steamer descaler” (asigură protecție împotriva coroziunii)
- ✓ Alte soluții de decalcifiere, cum ar fi acidul citric, ar putea deteriora unitatea
- ✓ Atenție: Soluția de decalcifiere este corozivă!
- ✓ Purtați ochelari de protecție și mănuși de protecție în timpul decalcifierii
- ✓ Nu utilizați unitatea în timpul decalcifierii!
- ✓ Orificiul de admisie trebuie să rămână deschis pe parcursul întregului proces de decalcifiere



Pas cu pas

1. Deconectați unitatea și lăsați-o să se răcească
2. Clătiți rezervorul de presiune cu apă și o perie de curățare
3. Închideți orificiul de serviciu
4. Umpleți rezervorul sub presiune cu 1 l de apă, apoi adăugați 1 l de soluție de decalcifiere Renfert POWER steamer descaler
5. Adăugați încă 0,6–0,8 l de apă după 15 minute.
Dacă face spumă, continuați să umpleți numai după ce se reduce spuma
6. Se lasă soluția de decalcifiere să înmoaie timp de 2–4 ore pentru murdărire mai ușoară și timp de 8–14 ore pentru o murdărire mai intensă
7. Deschideți orificiul de serviciu și goliți soluția de decalcifiere
8. Soluția de decalcifiere utilizată poate fi eliminată împreună cu apa uzată dacă este puternic diluată.
9. Clătiți rezervorul sub presiune de mai multe ori cu apă și periați-l



Alte informații

Informații suplimentare, cum ar fi instrucțiuni, fișe tehnice de securitate și videoclipuri de aplicare etc. pot fi găsite pe site-ul nostru web.



[www.renfert.com/
power-steamer-1](http://www.renfert.com/power-steamer-1)



[www.renfert.com/
power-steamer-2](http://www.renfert.com/power-steamer-2)

