

schülke -+



chirosan[®] plus

Dezinfectant sub formă de pulbere cu o bază de acid peracetic generat, destinat dezinfectării instrumentelor chirurgicale, pentru dezinfectia secundară și de nivel înalt a instrumentelor, endoscoapelor rigide și flexibile și pentru dezinfectia suprafețelor dispozitivelor medicale.

Eficient și economic

Avantajul nostru:

- Efect cu spectru complet
- Combinație de 3 enzime
- Eficient de la 5 minute
- Solubil, fără spumă
- Soluție stabilă pentru o perioadă de până la 36 de ore

Domeniu de utilizare:

chirosan[®] plus este destinat dezinfectiei și curățării manuale a instrumentelor și a mijloacelor ajutoare imediat după utilizare, prin imersie într-o soluție de lucru pregătită în prealabil. Este, de asemenea, potrivit pentru a fi utilizat pe aparate de curățare cu ultrasunete.

Preparatul este potrivit pentru dezinfectarea următoarelor:

- suprafețele dispozitivelor medicale prin ștergere (băi de hidroterapie)
- materiale pentru amprente dentare
- echipamente de anestezie
- tonometre
- măști de respirație
- endoscoape, incubatoare etc.

chirosan[®] plus este compatibil cu materialele obișnuite utilizate în domeniul sănătății. Este recomandat pentru instrumente și dispozitive auxiliare din oțel chirurgical, sticlă, plastic, cauciuc, porțelan, ceramică și perspex. Nu se utilizează pe instrumente din alamă, cupru, aluminiu, nichel sau instrumente cromate cu suprafețe deteriorate mecanic.

Instrucțiuni de utilizare:

Soluția dezinfectantă se prepară prin dizolvarea unei cantități măsurate de **chirosan[®] plus** în apă la o temperatură de 20 °C + -1. Se agită bine soluția. După 15 minute de activare și după agitare repetată, soluția este gata de utilizare.

Instrumentele și articolele folosite sunt scufundate complet în soluția activată de **chirosan[®] plus** pentru a se asigura că toate cavitățile instrumentelor vor fi umplute cu soluție (fără bule de aer). După expirarea timpului de expunere, scoateți instrumentele și clătiți-le cu apă.

Suprafețele dispozitivelor medicale pot fi dezinfectate și prin ștergerea cu o cârpă îmbibată în soluție de lucru. Obiectele vizibil murdare trebuie mai întâi curățate și apoi dezinfectate.

Spectrul de efecte:

Bactericid, complet virucid, micobactericid, tuberculocid, fungicid, sporicid

chirosan® plus

Compoziție:

chirosan® plus conține următoarele substanțe active:

- acid peracetic generat in situ
(soluția de 2% conține mai mult de 1000 ppm de acid peracetic)

Date fizico-chimice

formă	pulbere albă
miros	fără parfum
pH (soluție 2%)	7,5 - 8,5

Date logistice:

Denumirea produsului	Ambalare	Buc. în cutie
chirosan® plus	doză de 500 g	12
	găleată 1,5 kg	1
	găleată 6 kg	1

Instrucțiuni speciale:

Numai pentru piața profesională. Urmați cu atenție instrucțiunile de utilizare. Nu utilizați pe instrumente din alamă, cupru, aluminiu, nichel sau instrumente cromate cu suprafața deteriorată mecanic.

Perioada de valabilitate:

24 luni

Tipul de produs:

Dispozitiv medical clasa IIb [CE 1023]

Informații de mediu:

schülke fabrică produse în mod economic și cu procese de producție avansate, sigure și cu considerație pentru mediu, menținând în același timp standardele noastre înalte de calitate.

Schulke CZ, s.r.o. este deținătoare a certificatelor de calitate ISO 13485 și ISO 9001.

Pentru întrebări și informații individuale:

Serviciul clienți: tel.: +420 558 320 260

e-mail: schulkecz@schulke.com

Manager de produs: tel.: +420 724 806 894

Manager de export: tel.: +420 602 756 789



Informații suplimentare:

Vizitați site-ul nostru web:

www.schulke.cz

Producător:

Schulke CZ, s.r.o., Lidická 445
735 81 Bohumín, Republica Cehă
tel.: +420 558 320 260, www.schulke.cz



Distribuitor autorizat:

S.C. INTERCOOP S.R.L.
547215 Ernei Nr. 376, Jud. Mureș, România
Tel/Fax: 0265-267.708, E-mail: office@intercoop.ro

www.intercoop.ro