



**MINISTERUL SANATATII**  
**COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID**  
**MINISTRY OF HEALTH**  
**NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**



Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA  
Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Data emiterii: **28.02.2024**

**AVIZ**  
**Nr. 1830BIO/02/12.24**

În conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătății, al Ministrului Mediului și Pădurilor și al presedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/368/11/2010, privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare și cu Ordinul Ministrului Sănătății, al Ministrului Mediului și Pădurilor și al Presedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 637/2492/50/2012, privind aprobarea membrilor Comisiei Naționale pentru Produse Biocide și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, CNPB, în sesiunea din data de **02.12.2020** și **19.02.2024** a decis ca produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare

**I. DENUMIREA COMERCIALĂ ÎN ROMÂNIA**

**PERFORM**

**Alte denumiri comerciale, după caz**

**II. DATE DE IDENTIFICARE ALE PRODUCĂTORULUI** (numele, adresa, țara, inclusiv punctul de lucru pentru producătorii din România)

**SCHULKE & MAYR GMBH**, Norderstedt 22851, Germania

**III. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI** (numele, adresa, țara)

**INTERCOOP S.R.L**, Principală, nr.376, loc.ERNEI, jud. Mureș Romania

**IV. ÎNCADRAREA PRODUSULUI BIOCID** (în conformitate cu anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, cu amendamentele ulterioare)

|                              |   |
|------------------------------|---|
| A. Grupa principală:         | 1 |
| B. Tipul/Tipurile de produs: | 2 |

**V. DATE PRIVIND SUBSTANȚA ACTIVĂ / SUBSTANȚE**

**A. Substanțe chimice**

| Nr. crt. | Denumirea chimică (IUPAC, ISO sau altele)            | Nr. CE    | Nr. CAS    | Concentrația în unități metrice |
|----------|------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|
| 1        | Pentapotassium bis (peroxymonosulphate)bis(sulphate) | 274-778-7 | 70693-62-8 | 45%                             |

**VI. FORMA DE CONDIȚIONARE:**

Granule

**VII. MODUL DE AMBALARE (tipul, capacitate)**

Plicuri de 40 g; cutii de 900 g.

# AVIZ Nr. 1830BIO/02/12.24

## VIII. DOMENIUL ȘI ARIA DE UTILIZARE

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Domeniul de utilizare | Dezinfectante si algicide care nu sunt destinate aplicarii directe la oameni sau animale.                                                                                                                                                                     |
| B. Aria de aplicare      | Dezinfectia si curatarea suprafetelor mari inerte, suprafetelor dispozitivelor medicale si obiectelor de inventar, incubatoarelor pentru nou-nascuti si microaeroflora depusa pe suprafetele din unitati sanitare, cu exceptia dezinfectiei instrumentarului. |

## IX. EFICACITATE

| Activitate                      | Metoda de testare/ Protocol de testare                                                          | Specia                                                                                                                                                                   | Concen trații             | Timpi de acțiune   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Bactericidă                     | DIN EN 13727:2015-12 (phase 2, step 1), clean conditions, (low organic soiling) la 20 °C ± 1 °C | <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538<br><i>Enterococcus hirae</i> ATCC 10541<br><i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15442                                               | 0,5 %                     | 15 min.            |
| Bactericidă<br>Levuricidă       | DIN EN 16615:2015 (2/2) clean conditions la 20 °C ± 1 °C                                        | <i>Staphylococcus aureus</i> (ATCC 6538)<br><i>Enterococcus hirae</i> (ATCC 10541)<br><i>Pseudomonas aeruginosa</i> (ATCC 15442)<br><i>Candida albicans</i> (ATCC 10231) | 1%<br>0,5%                | 15 min.<br>60 min. |
| Levuricidă                      | EN 13624 (2021; Version08/2022): (phase 2, Step 1) clean conditions la 20 °C ± 1 °C             | <i>Candida albicans</i> ATCC 10231                                                                                                                                       | 1 %                       | 15 min.            |
| Fungicidă                       | DIN EN 13624:2022-08 (2/1) clean conditions la 20 °C ± 1 °C                                     | <i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404                                                                                                                               | 2%                        | 60 min.            |
| Tuberculocidă / Micobactericidă | DIN EN 14348:2005-04 (phase 2, step 1), clean condition la 20 °C ± 1 °C                         | <i>Mycobacterium terrae</i> ATCC 15755                                                                                                                                   | 2%                        | 60 min.            |
| Virucidă                        | DIN EN 14476 (2013+A2:2019) (2/1), clean conditions. la 20 °C ± 1 °C                            | <i>Modified vaccinia virus</i> Ankara*                                                                                                                                   | 0,25% (w/v)               | 5 min.             |
|                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                          | 0,1% (w/v)                |                    |
|                                 |                                                                                                 | <i>Adenovirus type 5 strain</i> Adenoid 75                                                                                                                               | 0,25% (w/v)<br>0.5% (w/v) | 5 min.             |
|                                 |                                                                                                 | <i>Murine norovirus strain</i> S99 strain 99 Berlin                                                                                                                      | 0.5% (w/v)                | 5 min.             |
|                                 |                                                                                                 | <i>Poliovirus type 1 strain</i> LSc2ab                                                                                                                                   | 1%                        | 5 min.             |
| Sporicidă                       | EN 17126 (2018) (phase 2, step 1) SOP 02-057; clean conditions la 20 °C ± 1 °C                  | <i>Clostridioides difficile</i> R027 NCTC 13366                                                                                                                          | 2% (w/v)                  | 60 min.            |
|                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                          | 1% (w/v)                  | 120 min.           |

**AVIZ Nr. 1830BIO/02/12.24****X. INDICAȚII DE UTILIZARE**

| Metoda de aplicare | Concentrația soluției de lucru / doza de aplicare | Timpul de acțiune                                |
|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ștergere           | 0,5 %                                             | 15 minute - activitate bactericida               |
|                    | 0,5 %                                             | 60 minute - activitate bactericida si levuricida |
|                    | 1 %                                               | 15 minute - activitate bactericida si levuricida |
|                    | 2 %                                               | 60 minute - activitate tuberculocida             |
|                    | 1 %                                               | 5 minute - activitate virucida limitata          |
|                    | 2%                                                | 60 minute - activitate fungicida                 |
|                    | 2%                                                | 60 minute - activitate sporicida                 |
|                    | 1%                                                | 120 minute - activitate sporicida                |

**XI. ETICHETAREA PRODUSULUI BIOCID**

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pictograme, simboluri și indicarea pericolului |  GHS05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fraze de pericol (H)                           | H314—Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.<br>H412 – Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fraze de precauție (P)                         | P273 – Evitati dispersarea in mediu<br>P280—Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.<br>P301+P330+P330—ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunati imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau un medic. Clatiti gura.<br>P303+P361+P353—ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș.<br>P305+P351+P338+P310—ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunati imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau un medic<br>P501—Aruncați conținutul/recipientul la o statie autorizata de eliminare a deseurilor. |

**XII. CATEGORIA DE UTILIZATORI**

Profesionali si industriali.

**XIII. RECOMANDARI/RESTRICTII PRIVIND PROTECTIA SANATATII SI A FACTORILOR DE MEDIU**

Nu exista.

Avizul este valabil până la data: **31.12.2024**, cu respectarea Art. 89 alin,(3), lit (a ) si (b) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

Indicatia de utilizare in unitati sanitare este valabila pana la data de **28.02.2027**.

Avizul conține – 3 pagini

Avizul a fost rescris in data de **28.02.2024**

PREȘEDINTE  
Dr. Chim. Gabriela Cilincă





**MINISTERUL SANATATII**  
**COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID**

**MINISTRY OF HEALTH**  
**NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA  
Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Data emiterii: 25.05.2021

## AVIZ DE EXTINDERE

În conformitate cu art. 8 din Ordinul Ministrului Sănătății, al Ministrului Mediului și Pădurilor și al Președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/368/11/2010, prin aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piața pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare, în baza documentelor depuse în completare la dosarul tehnic, CNPB, în ședința din data de 02.12.2020 și 10.05.2021 a decis că **Avizul Nr. 1830BIO/02/12.24** pentru produsul biocid **PERFORM**, se completează, după cum urmează:

### XI. ETICHETAREA PRODUSULUI BIOCID

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pictograme, simboluri și indicarea pericolului | <br>GHS05<br>Pericol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fraze de pericol (H)                           | H314—Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.<br>H412 – Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung<br>EUH208: Contine peroxidisulfat de dipotasiu. Poate provoca o reacție alergică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fraze de precauție (P)                         | P273 Evitați dispersia în mediu<br>P280 Purtați mănuși de protecție (de ex. Din cauciuc butilic) / echipament de protecție a ochilor / echipament de protecție a feței.<br>P301+P330+P331 ÎN CAZ DE ÎNGHITIRE: Clătiți gura. NU provocați vomă.<br>P303+P361+P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă și faceți dus.<br>P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.<br>P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.<br>P501 Aruncați conținutul/recipientul la o stație autorizată de eliminare a deseurilor. |

Extinderea este valabilă pe perioada valabilității avizului.  
Documentul conține - 1 pagină

PREȘEDINTE ROMANIA  
Dr. Chim. Gabriela Cîlîncă

