

Procesul de decalcifiere

POWER STEAMER 1+2



Vă rugăm să rețineți!

- Clătiți unitatea cu apă săptămânal. În acest scop, respectați și instrucțiunile din manualul de utilizare.
- Utilizați numai soluția „POWER STEAMER DESCALER“ (oferă protecție împotriva coroziunii).
- Alte soluții de detartrare precum acidul citric ar putea deteriora unitatea.
- Atenție: Soluția de detartrare este corozivă!
- Purtați ochelari de protecție și mănuși de protecție în timpul detartrajului.
- Nu utilizați steamerul în timpul detartrajului!
- Orificiul de admisie trebuie să rămână deschis pe durata întregului proces de detartrare.



Pas cu pas

1. Deconectați unitatea și lăsați-o să se răcească.
2. Rabatați capacul și slăbiți cele două șuruburi.
3. Scoateți piesa de aluminiu.
4. Clătiți rezervorul sub presiune cu apă și o perie de curățare.
5. Montați piesa de aluminiu.
6. Umpleți rezervorul sub presiune cu 1l de apă, apoi adăugați 1l Renfert POWER detartrant pentru aburi.
7. Adăugați încă 0,6–0,8 l de apă după 15 minute.

Dacă se formează spumă, continuați să umpleți numai după ce spuma s-a diminuat.
8. Lăsați soluția de detartrare să se înmoaie timp de 2–4 ore pentru murdărie mai ușoară și 8–14 ore pentru murdărie mai grea.
9. Îndepărtați și scurgeți soluția de detartrare.
10. Soluția de detartrare utilizată trebuie aruncată împreună cu apa uzată
11. Clătiți rezervorul sub presiune de mai multe ori cu apă și curățați cu perie.

Informații suplimentare

Informații suplimentare, cum ar fi instrucțiuni, fișe cu date de siguranță și videoclipuri cu aplicații, etc. pot fi găsite pe site-ul nostru web.



[www.renfert.com/
vapor-abur-1](http://www.renfert.com/vapor-abur-1)



[www.renfert.com/
motor-abur-2](http://www.renfert.com/motor-abur-2)

